



## TENSOCOLD Chladicí spray ve formě aerosolu



### Rozprašovač aerosolu pro okamžitě chlazení.

TENSOCOLD je produkt ve formě aerosolu, který zajišťuje okamžité chlazení a rychlou úlevu od bolesti doprovázející poranění měkkých tkání.

#### Přednosti produktu

Vhodný na rychlé ošetření na místě bezprostředně symptomů výronů a natažení svalů a šlach.

Zajišťuje okamžité chlazení a úlevu od bolesti doprovázející poranění měkkých tkání bez farmakologického účinku. Tlumení bolesti produktem TENSOCOLD se dosahuje chlazením, k němuž dochází při odpařování aerosolu z povrchu pokožky. Neobsahuje éter – pomáhá zabránit riziku podráždění pokožky po následné aplikaci kompresního obvazu. Neobsahuje CFC – je šetrný k životnímu prostředí.

#### Indikace

výrony, natažení sval a šlach, pohmoždění a sportovní traumatologie.

#### Upozornění

Pouze pro vnější použití – nesmí se aplikovat na otevřené rány, sliznice ani v blízkosti očí.

TENSOCOLD je nutno aplikovat v několika krátkých dávkách (stisknutích ventilku) ze vzdálenosti 15 cm, aby se zabránilo vzniku omrzlin.

TENSOCOLD - chladicí spray		
47422-1	TENSOCOLD	400ml