



## Physiopack®

### Zahřívací/chladicí polštářek pro opakované použití



**Physiopack** je polštářek s gelem pro opakované použití při léčbě teplem nebo chladem. Vhodné při poranění svalů, šlach a vaziva, zmenšování otoků a zatuhlých svalů.

Před použitím je nutno polštářek s gelem skladovat po dobu přibližně 2 hodin v mrazáku při teplotě  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Zahřátý polštářek **Physiopack** zlepšuje krevní oběh, elasticitu a plasticitu kolagenových vláken a tlumí tak bolest.

Polštářek s gelem lze zahřát v horké vodě nebo v mikrovlnné troubě.

**Dodávaný ve 3 velikostech.**

#### Indikace:

Léčba a rehabilitace poranění svalů, šlach nebo vaziva. Akutní a subakutní poranění doprovázené otoky (chlazení vyvolává vazokonstrikci). Chronické stavy jako svalová hypertonicita nebo revmatoidní artritida (léčba teplem).

#### Další poznámky:

Mezi pokožku pacienta a Physiopack je nutno vložit bavlněný ručník, aby se zabránilo vzniku popálenin. Přiložte na poraněnou končetinu na dobu cca 20 minut. Při zahřívání v mikrovlnné troubě je nutno dávat pozor, aby se produkt nepřehřál. Nezahřívajte produkt při teplotách nad  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**Použití:** – **kryo** – 2 hodiny v mrazáku ( $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

– **termo** – teplá voda – 7 minut

– mikrovlnná trouba – na 350 W – 3×20 sekund – na 800 W – 1×20 sekund + 1×10 sekund

Physiopack – gelový polštářek pro kryo a termo terapii		
72075-1	Physiopack	7 cm × 38 cm
72075-2	Physiopack	13 cm × 30 cm
72075-4	Physiopack	19 cm × 30 cm



#### Dodavatel:

Aura Medical s.r.o.  
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4  
Tel: 244 910 200, fax: 244 910 169  
IČO: 654 12 559