


ADVAN Skin Stapler

Sterilní klipovací systém k uzavírání povrchových ran.



Návod k použití

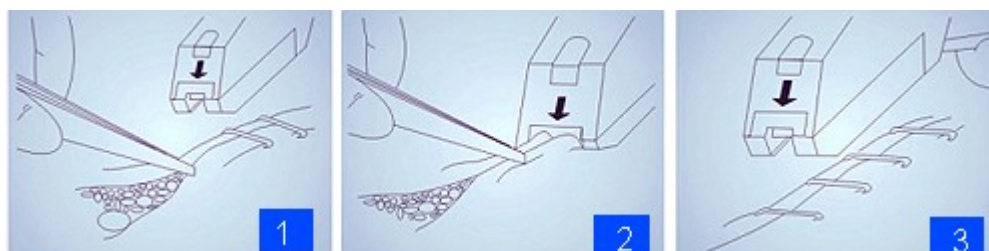

ADVAN Skin Stapler 35W .

jednorázové použití

Popis

Advan Skin Stapler je sterilní klipovací systém pro jednorázové použití, určené k uzavírání povrchových ran. Obsahuje 35 širokých spon z nerezové oceli. Po každém stisknutí páky se uvolní jedna spona. Spona nejdříve pronikne do kůže a následně se ohne do tvaru písmene D; spona tak drží obě strany tkáně u sebe.

Indikace a použití v klinické praxi

ADVAN Skin Stapler je vhodný pro rutinní použití při zavírání incizí po chirurgických výkonech; je nutno používat ji výhradně k uzavírání povrchových ran.

Kontraindikace

Použití ADVAN Skin Stapleru je kontraindikováno v místech, kde nelze zajistit minimální odstup 5 mm od kůže, cév nebo vnitřních orgánů pod kůží. ADVAN Skin Stapler se nesmí používat u nemocných trpících alergií na nikl.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

ADVAN Skin Stapler je určen výhradně pro jednorázové použití. Po použití je nutno ADVAN Skin Stapler zlikvidovat.

ADVAN Skin Stapler nepoužívat, jestliže obal byl již dříve otevřen nebo poškozen, popř. po uplynutí doby použitelnosti.

Nesmí se znovu používat, repasovat ani znovu sterilizovat. Opětovné použití nebo opětovná sterilizace tohoto zařízení by mohla vést k jeho selhání a následnému poranění pacienta.

Pokyny k použití

Pro snazší používání ADVAN Skin Stapler jsou učeny následující pokyny. Nejedná se však o doporučené chirurgické postupy!

Ve sterilních podmínkách sloupněte kryt obalu. Aby nedošlo k poškození, dejte pozor, aby zařízení nespadlo při jejím vyjímání z obalu na stůl. Před použitím mírně zvedněte okraje rány a přitáhněte je k sobě. Opatrně přiložte ADVAN Skin Stapler na okraje rány přitažené k sobě tak, aby „čelo“ bylo nad ránou a tělo podélně nad incizí. Páku stiskněte na doraz. Spona se v tkáni nyní uzavřela. Spona se v tkáni uvolní ze zařízení po úplném uvolnění páky ADVAN Skin Stapleru jejím sejmutím z povrchu rány. Další spony se na ránu umísťují při zachování rovnoměrného odstupu (přibližně po 1 cm) podél celé incize. Celý postup se opakuje až do úplného uzavření rány. Zkontrolujte pečlivě správné umístění a řádné uzavření spon.

V případě potřeby spony vyjměte a nahraďte je novými.

Materiál: 00Cr18Ni14Mo3 chirurgická ocel pro lékařské účely

Rozměry spony: Typ: 35W

Rozměry spony: šířka 7,2 mm, výška 4,9 mm

Tloušťka spony: 0,6 mm

